

Gebruikershandleiding VICAIR® 4 ZV

INTRODUCTIE

De Vicair 4 ZV is een veelzijdig zitkussen dat huidbescherming biedt voor mensen met een risico op decubitus. Het wordt gebruikt om comfort te bieden, het lichaam stabiel te ondersteunen, de lichaamshouding te verbeteren en decubitus te helpen voorkomen. De Vicair 4 ZV kan worden gebruikt als aanvulling op een behandelplan voor decubitus (categorie I-IV). De Vicair 4 ZV is bedoeld voor evaluatie en gebruik door artsen en therapeuten bij mensen die een risico lopen op decubitus. Bij gebruik volgens instructies zijn er geen contra-indicaties bekend.

ALGEMENE PRODUCTSPECIFICATIES

Zitkussen: Gemaakt van polyesterweefsel met polyurethaan coating
Vulling: Luchtgevulde SmartCells met low-friction coating
Kussenhoes: Bovenkant: Gebreide polyester stof. Onderste rand: Polyester stof met polyurethaan antislilaag.
Kussenhoes: Machinaal wasbaar. Voldoet aan EN1021-1, EN1021-2 en CAL117.
Latex vrij

Gebruikersgewicht: Maximaal: 250 kg
Temperatuur: Minimum: -20 °C, maximum: 55 °C
Luchtvochtigheid: Minimum: 0%, maximum 100%

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Vicair B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, oneigenlijk gebruik of nalatigheid. Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig leest en begrijpt.

Waarschuwing! Vicair B.V. raadt aan om de Vicair 4 ZV te installeren onder direct toezicht van een therapeut of hulpmiddelenadviseur.

Waarschuwing! Gebruik altijd een hoes voor het zitkussen.

Waarschuwing! Uw stuitje en bekkenbeen mogen geen contact maken met de bodem van het zitkussen. Dit wordt doorzitten genoemd. Controleer tijdens het eerste gebruik en daarna regelmatig, minstens om de drie maanden, op doorzitten. Stop met het gebruik van het product bij doorzitten en raadpleeg uw therapeut of hulpmiddelenadviseur.

Waarschuwing! Controleer uw huid regelmatig op roodheid, vooral tijdens de eerste paar dagen van het gebruik van dit product. In geval van roodheid dat niet na 15 minuten verdwijnt, raadpleeg uw therapeut of hulpmiddelenadviseur.

Waarschuwing! Er zijn momenteel geen testgegevens beschikbaar over het veilig gebruik van Vicair kussens in motorvoertuigen. Daarom moedigen we het gebruik van de kussens in motorvoertuigen niet aan.

Waarschuwing! In geval van vervuiling met lichaamsvloeistoffen en bij het gebruik van het product door een andere gebruiker moet het product gedesinfecteerd worden om kruisbesmetting te voorkomen.

Waarschuwing! Controleer het product elke drie maanden op slijtage, naast de regelmatige controle op doorzitten. Gebruik het product niet meer in het geval van ernstige schade en/of doorzitten. Neem contact op met uw therapeut of met de hulpmiddelenadviseur.

Voorzichtig! Gebruik of bewaar dit product niet dichtbij open vuur of een sterke hittebron.

Voorzichtig! Reinig het product niet met stoom of een autoclaaf. Het kan niet tegen overmatige hitte (meer dan 60°C) of druk. Het niet volgen van de bijgeleverde reinigingsinstructies kan de levensduur van het product en/of de hoes aanzienlijk verminderen.

Voorzichtig! Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het zitkussen te reinigen.
Let op! Zorg ervoor dat het zitvlak van de stoel waarop het zitkussen is geplaatst schoon en vetvrij is, om verschuiven te voorkomen.

Opmerking! Vicair B.V. raadt aan om het zitkussen 2400 m boven zeeniveau of 50 m onder zeeniveau niet te gebruiken.

INSTALLATIE

- Breedte en diepte van het zitkussen en het stoelzitvlak moeten overeenkomen. Kleine afwijkingen zijn toegestaan.
- Trek de kussenhoes over het zitkussen.
- Plaats het zitkussen op het zitvlak van de stoel.
- Ga enkele minuten op het zitkussen zitten, zodat het zich aan de vorm van uw lichaam kan aanpassen.

Controleren op doorzitten

- Controleer op doorzitten, nadat u ongeveer 5 minuten op het zitkussen heeft gezeten.
- Laat uw therapeut, hulpmiddelenadviseur of zorgverlener een hand tussen het onderste botvormige uitsteeksel en het Vicair-kussen schuiven terwijl u naar voren leunt en vraag of uw onderste botvormig uitsteeksel ondersteund wordt door ten minste 2,5 cm SmartCells™ om contact met het zitvlak van de stoel te voorkomen.
- In geval van doorzitten het zitkussen niet gebruiken. Neem contact op met uw therapeut of met de hulpmiddelenadviseur.

GEBRUIK

Ready for use

Dit Vicair product is klaar voor gebruik. Vicair B.V. raadt aan om uw Vicair zitkussen dagelijks voor gebruik op te schudden.



Gebruik in motorvoertuigen

Gebruik het zitkussen niet in motorvoertuigen.

Het kussen door een ander persoon laten gebruiken

Het product is geschikt voor herhaald gebruik. Het aantal keren dat het gebruikt kan worden hangt af van hoe vaak en op welke manier het product gebruikt wordt. Het product moet grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd, voordat een andere persoon het mag gebruiken.

Vervangen van de kussenhoes

Vicair B.V. beveelt aan om bij normaal gebruik de kussenhoes ieder jaar te vervangen. Kussenhoezen kunnen los besteld worden.

Het product weggooien

Het weggooien en recyclen van product en verpakking moet worden uitgevoerd overeenkomstig de hiervoor geldende regelgeving. Zorg ervoor dat het product voor het weggooien is gereinigd, ter voorkoming van kruisbesmetting.

ONDERHOUD EN REINIGING

Het reinigen van de kussenhoes van de Vicair 4 ZV

De kussenhoes is machinaal wasbaar. Volg hiervoor de wasinstructies op het label aan de binnenkant van de kussenhoes.



Het reinigen van het Vicair 4 ZV kussen

Het gevulde zitkussen niet in de wasmachine wassen. Dompel het zitkussen niet onder in water of andere vloeistoffen. Volg de wasvoorschriften op het kussenlabel. Verwijder de kussenhoes en veeg het zitkussen schoon met een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel. Zware verontreinigingen kunnen worden schoongemaakt door de vlek eerst in te weken met een schoonmaakmiddel en dan met een zachte borstel het vuil te verwijderen.



Het desinfecteren van uw Vicair 4 ZV

Reinig het zitkussen en de kussenhoes zoals hierboven beschreven. Gebruik bij voorkeur een antibacterieel middel. Spuit na het reinigen een desinfecterend middel op het zitkussen en de kussenhoes. Buig de compartimenten naar buiten, zodat het middel goed in de spleten komt.

MELDEN VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Ernstige incidenten die voortkomen uit het gebruik van Vicair-producten dienen zowel bij de fabrikant als bij de betreffende bevoegde instantie te worden gemeld.

GARANTIE

Ga naar vicair.com voor volledige informatie inzake garantieprocedures en garantievoorwaarden.

Vicair B.V. biedt een beperkte garantie op productie- en materiaalfouten, onder voorwaarde dat het product op normale wijze is gebruikt. Elke schade die ontstaat door abnormaal gebruik, onjuist hanteren, reinigen of nalatigheid, valt niet onder deze garantie.


Garantieperiode

Vanaf originele aanschafdatum: 24 maanden.

Indien er binnen bovengenoemde garantieperiode productie- of materiaalfouten optreden, zal Vicair B.V. – naar eigen inzicht en goeddunken – het product kosteloos repareren dan wel vervangen. De kussenhoes valt buiten de garantie. De garantie beperkt zich tot het repareren of vervangen van het product. In geen geval zullen de garantiekosten eventuele gevolgschade dekken of kosten van de verkochte non-conforme producten overstijgen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Vicair B.V. via info@vicair.com.

Vicair B.V. 
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
info@vicair.com
www.vicair.com



070143-REV 03/2024